


🐾 メニわん シリコンボール 🐾

下記の13種類サイズを取り揃えております。

12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm
19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 26mm

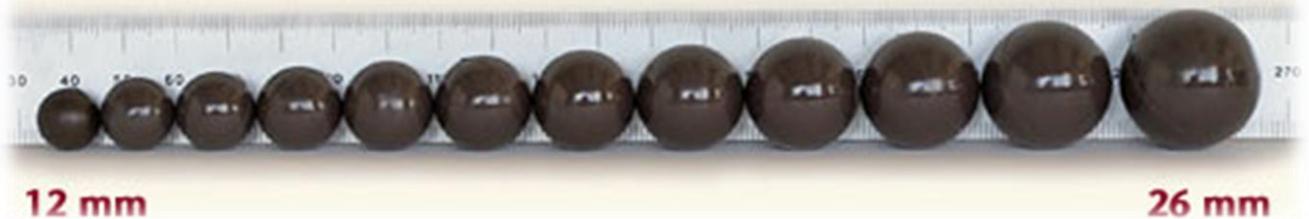

—シリコンボールの滅菌について—

1. 洗浄

オートクレーブでの滅菌前に、シリコンボールを洗剤（一般的な台所洗剤でOK）で洗浄し、それから洗剤を水道水で良く洗い流します。
洗浄後すぐに、オートクレーブ用の滅菌バックに入れます。

2. 滅菌

シリコンボールは使用前にオートクレーブ滅菌を実施します。製品を繰り返しオートクレーブで処理した場合、まれに変色・砕け・ヒビ割れのような症状が発生する可能性があります。そのような、症状を確認した場合は製品を破棄して下さい。

注) シリコンボールのEOG（エチノキサイトガス）滅菌はお勧め致しません。



Meni-One

発売元：株式会社メニワン

〒460-0006 名古屋市中区葵三丁目21番19号（お問合せ先）TEL (052) 935-1517

*メニわんおよびそのロゴは株式会社メニワンの登録商標または商標です。

愛犬・愛猫に関する健康気配り掲載中 www.meni-one.com